

Návod k instalaci skříně pro AED

AIVIA 210

AIVIA



1




Podle přiložené šablony, imitující velikost skříně, obkreslete a následně vyvrtejte do zdi 3 díry.

2





Vyloupněte perforovanou část šablony v pravém dolním rohu. Vzniklý otvor naznačuje prostor pro přístup přívodního el. kabelu.

3

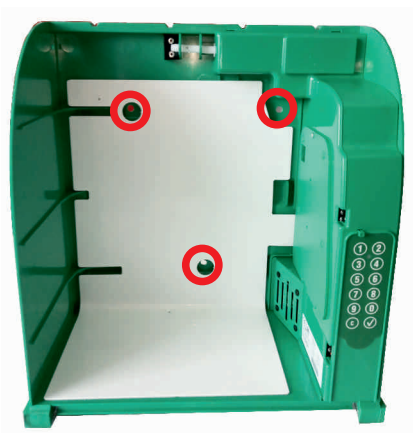


Přišroubujte skříně na stěnu přes označené otvory. Dbejte na přístup k otvoru pro přívod el. kabelu, viz. bod 2.

4

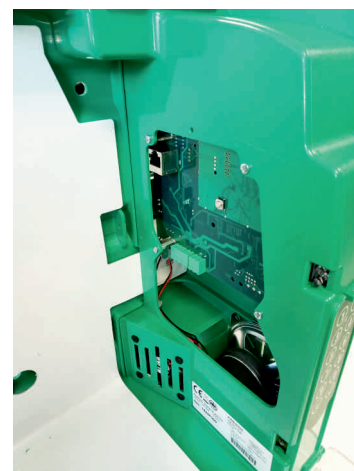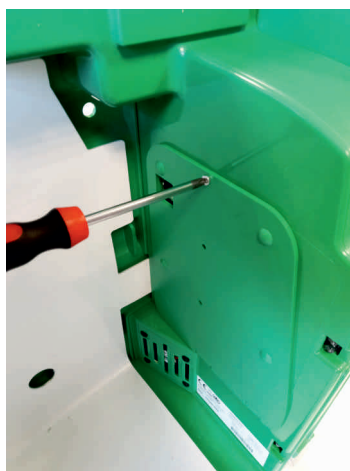


Uvnitř skříně odšroubujte servisní kryt pro přístup k přivedení el. kabelu.

5

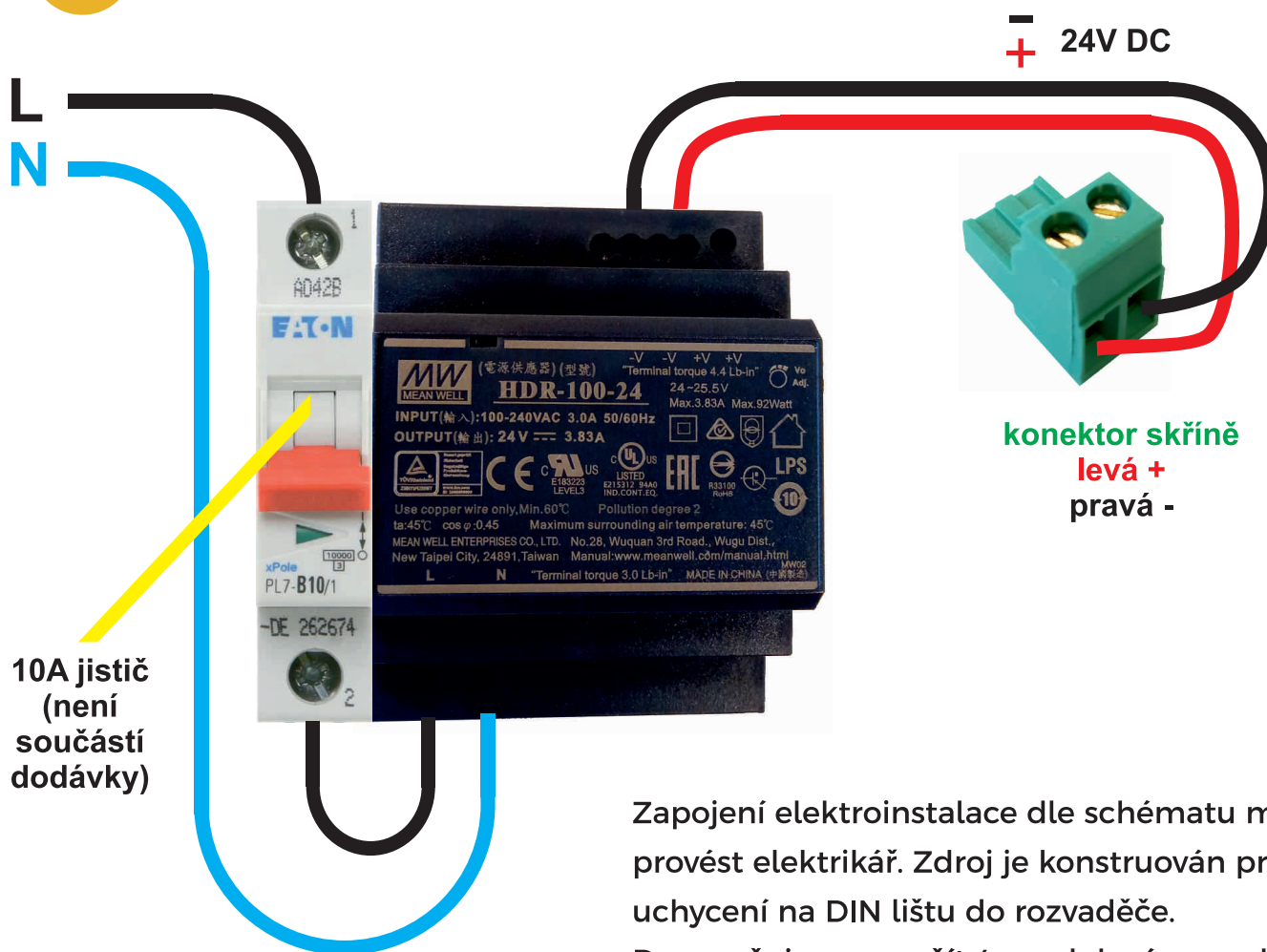


6

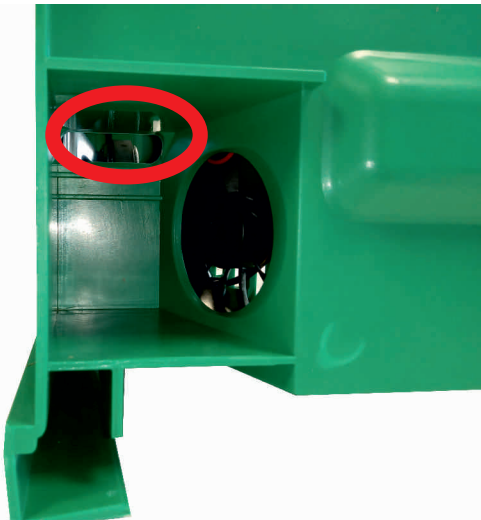

Přívodní kabel s konektorem přiveďte do skříně **označeným** otvorem v zadní části skříně. Konektor **NEZAPOJUJTE**, zapojení spolu s naprogramováním skříně provede technik společnosti AED line.

Nouzové otevření

Skříň lze nouzově otevřít pomocí dodané kovové tyčinky při dodržení následujícího postupu:

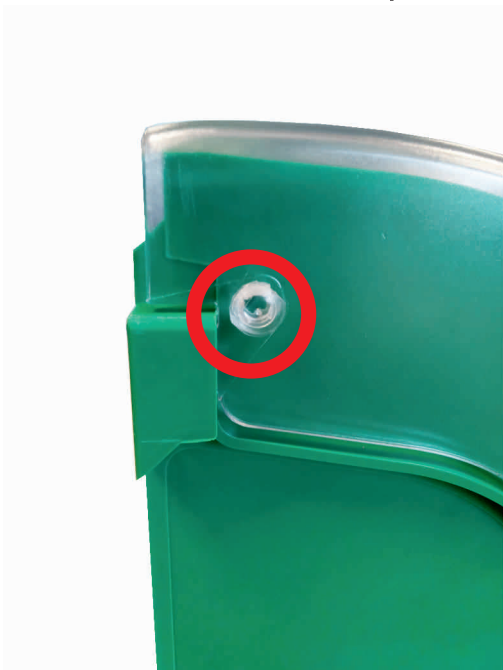

A Odloupněte **plastovou krytku** z otvoru pro nouzové otevření na vrchu pravé strany skříně.



B Do otvoru vložte přiloženou kovovou tyčinku a silným zatlačením do bílé západky zámku uvolněte jistící mechanismus. Následně je skříň možné otevřít.