



# Beaty

asistent nepřímé  
srdeční masáže

## Proč Beaty?



Ročně zemře jen v ČR asi 35.000 lidí na zástavu srdce.



88 % případů se stane v domácím prostředí.



V případě srdeční zástavy dochází přibližně po 4 minutách k nezvratnému poškození mozku. Tomu lze zabránit okamžitým zahájením resuscitace - stlačováním hrudníku ve správném rytmu 120/min a do správné hloubky 5-6 cm.



70 % záchránců nedokáže poskytnout efektivní resuscitaci.



Udržovat správnou hloubku stlačení hrudníku během resuscitace je pro profesionály velmi obtížné a pro laické záchránce téměř nemožné.

**x3**

Správné provádění resuscitace může ztrojnásobit šanci na přežití.


## Resuscitace s použitím Beaty



Zkontrolujte vědomí  
Jemně postiženým zatřeste  
Hlasitě jej oslovte: „Jste v pořádku?“



Pokud nereaguje  
Zprůchodněte dýchací cesty  
záklonem hlavy a zkontrolujte  
dýchání a volejte 155.

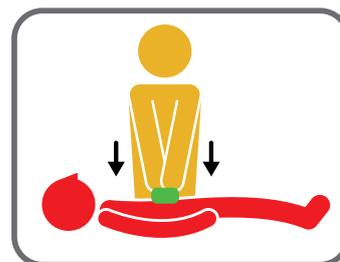

Ihned zahajte resuscitaci  
Pomocí „Beaty“



Při správné hloubce stlačení  
hrudníku 5-6 cm upozorní  
uživatele pípnutím




Metronom vibracemi určuje  
správný rytmus stlačování  
hrudníku - 120/min



Zcela bezúdržbový,  
životnost baterie 3 roky



Snadné použití,  
uživatelsky přívětivý

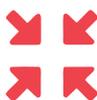

Malé rozměry a nízká  
hmotnost, navržen tak,  
aby se vešel kamkoliv



Cenově dostupný přístroj  
zachraňuje to nejcennější  
- lidský život

## Co je to Beaty?

Je to asistent nepřímé srdeční masáže, který kontroluje a pomáhá provádět efektivní resuscitaci.

Malý přístroj, který najde své místo v kapse u kalhot, na klíčkách, jako přívěsek, v lékárně a podobně. Přiložením na hrudník zachraňované osoby získáte velmi užitečného pomocníka, který vám zaručí správnou hloubku a rytmus srdeční masáže.

**Šance na přežití se díky jeho použití ztrojnásobí!**

## Použití

Laický záchranář ○ Policie ○ Hasiči ○ Armáda ○ ZZS ○ Školitelé první pomoci

